

## INFO KOMPAKT

### FRANK® Würfel-Pessar

#### Indikation:

Stressinkontinenz, verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmutterensenkung, Beckenbodenschwäche, Belastungsinkontinenz, Harninkontinenz, Vorfall der Scheide. Auch bei geringer Stabilität des Beckenbodens einsetzbar.



Das Pessar ist aus implantationsgetestetem Silikon, physiologisch unbedenklich und cadmiumfrei eingefärbt. Das Frank® Würfel-Pessar aus Silikon entspricht den Richtlinien des MPG. (Medizin-Produkte-Gesetz).

### FRANK® Würfel-Pessar Siebform (gelocht)

Art.-Nr.	PZN		
106 820	04925 605	25 mm	Größe 0
106 821	04925 611	29 mm	Größe 1
106 822	04925 628	32 mm	Größe 2
106 823	04925 634	37 mm	Größe 3
106 824	04925 640	41 mm	Größe 4
106 825	04925 657	45 mm	Größe 5
106 826	06869 733	55 mm	Größe 6
106 827	06869 756	65 mm	Größe 7
106 828	06869 762	70 mm	Größe 8
106 829	06869 779	75 mm	Größe 9

Hilfsmittel-Nr. 15.25.21.0037



**BF-COMFORT**  
INKONTINENZVERSORGUNG


### Auskunft und Info:



**Büttner-Frank GmbH**  
Am Wolfsmantel 9-11  
91058 Erlangen  
- Germany -



Büttner-Frank GmbH

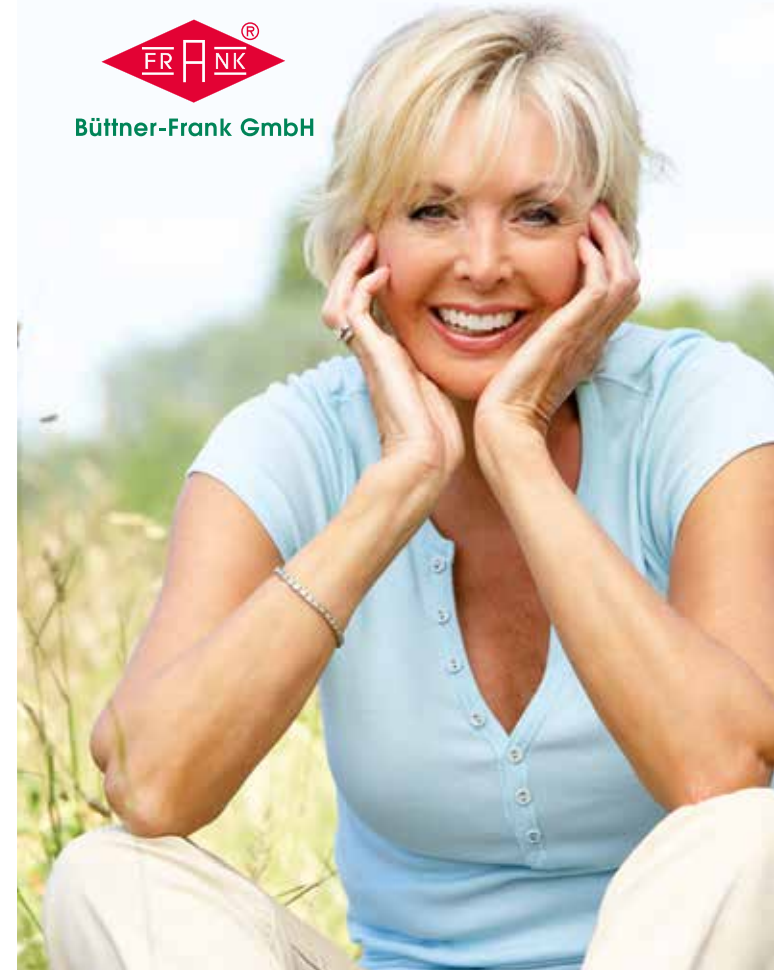

**FRANK® Würfel-Pessar  
aus Silikon**

Die Kontrolle behalten in jeder Lebenslage

PATIENTENINFORMATION

02/2015




Neuere Statistiken belegen, dass jede zweite Frau ein Problem mit Blasenschwäche hat. Oft ist eine Gebärmutter-Scheidensenkung schuld an diesem unangenehmen Leiden. Durch das operative Liften des Bindegewebes, Einlegen eines Bandes oder Netzes, kann dieses Problem für einige Jahre gestoppt werden.

Doch nicht alle Frauen können oder wollen operiert werden! Für diese Patientinnen bietet das Sieb-Würfelpessar eine wirkungsvolle Hilfe.

Durch die besondere Form lässt sich das Pessar gut in die Scheide einlegen (ähnlich wie ein Tampon) und hält Gebärmutter und Scheide im Becken fest. Gleichzeitig wird eine Lageverbesserung von Blase und Mastdarm erreicht und beim Gehen und Bewegen der Beckenboden trainiert.

Das Würfelpessar beweist seine ausgezeichnete Funktion auch bei schwersten Senkungsfällen, sowie bei Stressinkontinenz und ist in zehn Größen verfügbar.

Die gelochte Form erlaubt das Abfließen von Sekret und erleichtert das Entfernen. Die Anpassung und Verordnung wird von Ihrem Facharzt (Gynäkologen oder Urologen) vorgenommen, der auch über Zusatztherapien berät und das Pessar auf Rezept verschreibt.

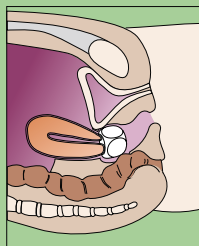

### Reinigung und Pflege

Würfelpessare werden am Abend herausgenommen, mit lauwarmem Wasser gereinigt und morgens wieder eingesetzt.

### WICHTIG:

Das Pessar kann mit der Silikonschlinge selbständig von der Patientin entfernt und nach der Reinigung mit warmem Wasser wieder eingesetzt werden. Von Vorteil ist die Verwendung von Salbe oder Gleitgel bei der Einführung und bei extremer Scheidentrockenheit auch beim Entfernen des Pessars.

Eine ergänzende Behandlung (medikamentös oder in Kombination mit HRT - hormone replacement therapy), kann jederzeit in Abstimmung mit Ihrem Arzt erfolgen.

Kontraindikationen:  
Silikonunverträglichkeit

Risiken/Nebenwirkungen:  
Dekubitus (Druckgeschwür)

Eine ärztliche Kontrolle wird viertel bis halbjährig empfohlen.

### Vorteile des FRANK® Sieb-Würfel-Pessars:

- leichtes Entfernen des Pessars durch die gesiebte Form
- einmalige Anpassung durch den Facharzt
- leichtes eigenständiges Einsetzen und Entfernen durch die Trägerin selbst
- das FRANK® Sieb-Würfel-Pessar besteht aus reinem Silikon, ist einfach zu reinigen
- Pessare sind Hilfsmittel, verordnungsfähig und werden von der Krankenkasse erstattet.



Das FRANK® Würfel-Pessar aus 100% verträglichem Silikon. Physiologisch unbedenklich, cadmiumfrei eingefärbt.