

- Die maximale Verwendbarkeitsdauer liegt bei drei Zyklen à 29 Tage oder entsprechend der ärztlichen Anweisung.
- Die Verträglichkeit und Richtigkeit der Pessarlage ist durch Ultraschall und/oder Befragung der Patientin sicherzustellen.
- Vor jeder Anwendung ist das Schalenpessar nach Schatz auf Unversehrtheit und Sauberkeit der Oberfläche zu prüfen. Bei Veränderungen der Oberfläche ist das Schalenpessar durch ein Neues zu ersetzen.
- Verwenden Sie keine weiteren Hilfsmittel beim Entfernen des Schalenpessars nach Schatz. Sollte das Entfernen nicht möglich sein, lassen Sie das Schalenpessar nach Schatz baldmöglichst von einem Arzt entfernen.
- Nicht während der Menstruation und nie zusammen mit einem Tampon verwenden, es sei denn mit ärztlicher Rücksprache.
- Das Schalenpessar nach Schatz ist aus Silikon und physiologisch unbedenklich.
- Das Schalenpessar nach Schatz kann bei Verwendungsunterbrechung gereinigt und in trockenem Zustand in einem sauberen Polybeutel verpackt aufbewahrt werden.
- Das Schalenpessar nach Schatz kann nach Verwendung über den Hausmüll entsorgt werden.



Auskunft und Info:



Büttner-Frank GmbH
Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen
www.buettner-frank.de
- Germany -



CE 0197



V04-2025
BNR 606201



Büttner-Frank GmbH

Schalenpessar nach Schatz aus Silikon

Anwendungsbereich:
Zur Behandlung bei verschiedenen Graden der Gebärmutter- und Scheidensenkung, Deszenus des Blasenhalses, Harninkontinenz und Beckenbodenschwäche. Das Schalenpessar nach Schatz hat keine biegsame Faltzone und ist somit starr.



GEBRAUCHSANWEISUNG



Hersteller:
Büttner-Frank GmbH • Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen
Telefon: 09131 79 05-0 • Fax: 09131 60 27 69
E-Mail: kundenservice@buettner-frank.de • www.buettner-frank.de



Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner

Einsetzen des Schalenpessars nach Schatz




Vor der ersten Anwendung reinigen Sie das Schalenpessar nach Schatz durch Auskochen in reichlich Wasser für ca. 5 Minuten. Spülen Sie es anschließend mit kaltem Wasser ab und lassen Sie das Schalenpessar nach Schatz trocknen. Kontrollieren Sie vor dem Einführen das Schalenpessar auf Unversehrtheit, Sauberkeit, Verfärbungen, Schäden und Abnutzung. Bei sichtbaren Schäden oder Veränderungen der Oberfläche ersetzen Sie das Schalenpessar nach Schatz durch ein Neues.

Das Schalenpessar nach Schatz morgens in die Scheide einführen und abends wieder entfernen, damit sich das empfindliche Scheidengewebe über Nacht erholen kann. Halten Sie sich jeweils an die Anweisungen Ihrer Ärztin/Ihres Arztes.

Vor dem Einsetzen waschen Sie sich bitte die Hände. Führen Sie nun das Schalenpessar nach Schatz in die Scheide ein. Um das Einführen zu erleichtern, können Sie verschiedene Positionen ausprobieren z. B. ein Bein auf die Bettkante stellen oder das Schalenpessar nach Schatz in der Hocke oder im Liegen einführen. Schieben Sie das Schalenpessar nach Schatz in die Position, die Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt gezeigt hat.

Achten Sie darauf, dass Sie das Schalenpessar zunächst in das hintere Scheidengewölbe einlegen. Das Schalenpessar nach Schatz sitzt in der richtigen Position, wenn es nicht drückt.

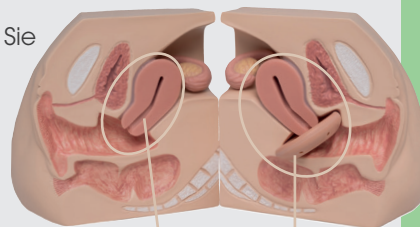

ohne Pessar mit Schalen-Pessar

Entfernen des Schalenpessars nach Schatz

Bitte waschen Sie sich auch vor dem Entfernen die Hände. Zur Erleichterung des Entfernens können Sie den Scheidenbereich mit Gleitgel benetzen. Fassen Sie nun das Schalenpessar nach Schatz mit dem Zeigefinger (am Besten im Schalenloch) und ziehen Sie das Schalenpessar aus der Scheide heraus.

Reinigung des Schalenpessars nach Schatz

Die Reinigung des Pessars erfolgt in warmem sauberem Leitungswasser in einer Spüle/Wanne.

1. Legen Sie das Pessar in die Wanne und tränken Sie eine weiche Reinigungsbürste im Wasser.
2. Bürsten Sie jeweils über allen Oberflächen und entlang aller Kanten. Stellen Sie sicher, dass alle Öffnungen erreicht sind.
3. Den Vorgang zweimal wiederholen
4. Pessar aus dem Wasser entnehmen.
5. Zum Schluss das Pessar unter fließendem Wasser bis zur optischen Sauberkeit abspülen.
6. Trocknen lassen.

Eine Verwendung von Desinfektions- oder Seifenlösungen ist nicht notwendig.

Hinweis: Verwenden Sie keine chemischen Mittel, Haushaltsreiniger oder Spülmittel zur Reinigung. Legen Sie das Schalenpessar nicht in die Mikrowelle.

Kontraindikationen:

Silikonunverträglichkeit, Schwangerschaft, lokale Infektionen des Urogenitaltraktes (z. B. Blasen-, Harnwegs- oder Scheidenentzündung)

Risiken/Nebenwirkungen:

Druckulzera

Material: Silikon

Allgemeine Hinweise

- Lesen und beachten Sie vor und bei der Anwendung diese Gebrauchsanweisung.
- Anleitung durch medizinisches Fachpersonal.
- **Das Schalenpessar nach Schatz ist nur zur Anwendung an der gleichen Patientin bestimmt.**
- Mehrfachverwendung bei gleicher Patientin ist möglich.
- Die maximale Anwendungsdauer ohne ärztliche Kontrolle beträgt 29 Tage.



Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner

Infos unter: Tel. 09131 7905-0 • Fax. 09131 / 602769 • E-Mail: kundenservice@buettner-frank.de • www.buettner-frank.de