


Unser FRANK Würfel-Pessar – mit dem hygienischen Rückholband aus Silikon!

- Sollte es für Sie unangenehm sein, dass das Rückholband beim Tragen aus der Scheide herausragt, so haben Sie die Möglichkeit, dieses beim Einführen doppelt zu nehmen (Abb. 1).
- Die Lage des Rückholbandverschlusses hat keine Auswirkung auf die Funktionalität und kann beliebig verändert werden (Abb. 2 u. 3), für die längste Beständigkeit empfehlen wir die Lage von Abb. 3.

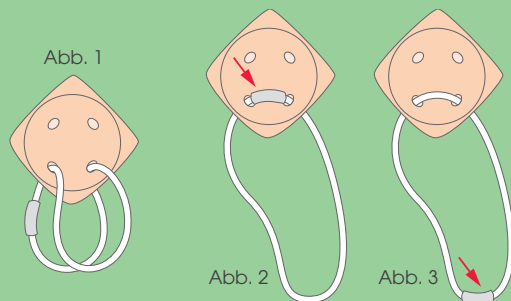

PESSARPASS

Patientin: _____

Pessartyp: _____

Größe: _____

Zur Vermeidung von Infektionen und/oder Entzündungen ist eine regelmäßige Kontrolle nötig.

Kontrolltermine

1. _____

2. _____

3. _____

INFO KOMPAKT

FRANK Würfel-Pessar

Kontraindikationen:

Silikonunverträglichkeit, Schwangerschaft, lokale Infektionen des Urogenitaltraktes (z. B. Blasen-, Harnwegs- oder Scheidenentzündung)

Risiken/Nebenwirkungen:

Druckulzera

Material:

Silikon



BF-COMFORT
INKONTINENZVERSORGUNG

Auskunft und Info:



Büttner-Frank GmbH

Am Wolfsmantel 9-11
91058 Erlangen
- Germany -



V04-2025
BNR 606910



Büttner-Frank GmbH



FRANK Würfel-Pessar aus Silikon



Zur Behandlung bei verschiedenen Graden der Gebärmutter- und Scheidensenkung, Deszensus des Blasenhalses, Harninkontinenz und Beckenbodenschwäche, Stress- und Urge-Inkontinenz.

GEBRAUCHSANWEISUNG



CE 0197



Hersteller:

Büttner-Frank GmbH • Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen
Telefon: 09131 79 05-0 • Fax: 09131 60 27 69
E-Mail: kundenservice@buettnner-frank.de • www.buettnner-frank.de



Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner



Vor der ersten Anwendung


Vor der ersten Anwendung reinigen Sie das FRANK Würfel-Pessar durch Auskochen in reichlich Wasser für ca. 5 Minuten. Anschließend lassen Sie das FRANK Würfel-Pessar trocknen.

Kontrollieren Sie vor jedem Einführen das FRANK Würfel-Pessar auf Unversehrtheit, Sauberkeit, Verfärbungen, Schäden und Abnutzung. Prüfen Sie die Festigkeit des Rückholfadens. Bei sichtbaren Schäden oder Veränderungen der Oberfläche ersetzen Sie das FRANK Würfel-Pessar durch ein neues.

Einsetzen des FRANK Würfel-Pessars

Das FRANK Würfel-Pessar morgens in die Scheide einführen und abends wieder entfernen, damit sich das empfindliche Scheidengewebe über Nacht erholen kann. Halten Sie sich jeweils an die Anweisungen des ärztlichen Fachpersonals.

Vor dem Einsetzen waschen Sie sich die Hände. Führen Sie nun das FRANK Würfel-Pessar mit dem Silikonband nach unten, wie einen Tampon, in die Scheide ein. Das FRANK Würfel-Pessar ist flexibel und lässt sich gut falten bzw. zusammendrücken. Um das Einführen zu erleichtern, können Sie verschiedene Positionen ausprobieren z. B. ein Bein auf die Bettkante stellen oder das FRANK Würfel-Pessar in der Hocke oder im Liegen einführen. Versuchen Sie das FRANK Würfel-Pessar so weit wie möglich in die Scheide zu schieben. Das FRANK Würfel-Pessar sitzt in der richtigen Position, wenn es nicht drückt.

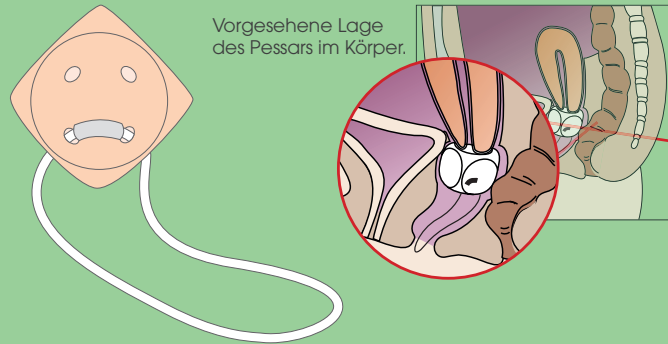

Vorgesehene Lage des Pessars im Körper.

Allgemeine Hinweise:

- Lesen und beachten Sie vor und bei der Anwendung diese Gebrauchsanweisung.
- **Das FRANK Würfel-Pessar ist zur ausschließlichen Anwendung an einer Patientin bestimmt.**
- Die maximale Anwendungsdauer ohne ärztliche Kontrolle beträgt 29 Tage.
- Die maximale Verwendbarkeitsdauer liegt bei drei Zyklen à 29 Tage oder entsprechend der ärztlichen Anweisung.
- Die Verträglichkeit und Richtigkeit der Pessarlage ist durch Ultraschall und/oder Befragung der Patientin sicherzustellen.
- Sollte der Rückholfaden ausnahmsweise reißen, versuchen Sie bitte das FRANK Würfel-Pessar mit den Fingern zu entfernen (keine zusätzlichen Hilfsmittel verwenden). Sollte dies nicht möglich sein, lassen Sie das FRANK Würfel-Pessar baldmöglichst von einem Arzt entfernen.
- Das FRANK Würfel-Pessar ist aus Silikon und physiologisch unbedenklich.
- Nicht während der Menstruation und nie zusammen mit einem Tampon verwenden, es sei denn mit ärztlicher Rücksprache.
- Das FRANK Würfel-Pessar kann bei Verwendungsunterbrechung gereinigt und in trockenem Zustand in einem sauberen Polybeutel verpackt aufbewahrt werden.
- Das FRANK Würfel-Pessar kann nach Verwendung über den Hausmüll entsorgt werden.

Entfernen des FRANK Würfel-Pessars

Waschen Sie sich auch vor dem Entfernen die Hände. Ziehen Sie das Rückholband so weit nach unten, bis Sie einen leichten Widerstand der Beckenbodenmuskulatur spüren. Wichtig ist nun das Vakuum an der Scheidenwand zu lösen. Versuchen Sie hierzu mit dem Zeige- oder Mittelfinger (verwenden Sie keine anderen Hilfsmittel!) die Kanten des FRANK Würfel-Pessars von der Scheidenwand zu lösen. Ein Positionswechsel (in der Hocke oder ein aufgestelltes Bein) kann das Entfernen des Pessars erleichtern. Sobald das Vakuum gelöst ist, ziehen Sie mit kreisenden Bewegungen an dem Rückholband das FRANK Würfel-Pessar aus der Scheide heraus.

Hinweis:

Vor dem Entfernen immer mit den Fingern die Kanten des FRANK Würfel-Pessars von der Scheidenwand lösen, damit Luft eindringen kann und sich das Vakuum löst. Sonst besteht die Gefahr, dass das Rückholband abreißt.

Reinigung und Pflege

Die Reinigung des Pessars erfolgt in warmem sauberem Leitungswasser in einer Spüle/Wanne:

1. Legen Sie das Pessar in die Wanne und tränken Sie eine weiche Reinigungsbürste im Wasser.
2. Bürsten Sie jeweils über alle Oberflächen und entlang aller Kanten. Stellen Sie sicher, dass alle Öffnungen erreicht sind.
3. Den Vorgang zweimal wiederholen
4. Pessar aus dem Wasser entnehmen.
5. Zum Schluss das Pessar unter fließendem Wasser bis zur optischen Sauberkeit abspülen.
6. Trocknen lassen.

Eine Verwendung von Desinfektions- oder Seifenlösungen ist nicht notwendig.

Hinweis: Verwenden Sie keine chemischen Mittel, Haushaltsreiniger oder Spülmittel zur Reinigung. Legen Sie das FRANK Würfel-Pessar nicht in die Mikrowelle.