

Faltung



C-Faltung

Punchdown-Faltung

S-Faltung

Reinigung

Sie sollten Ihre **Me Luna®** Tasse mit kochendem Wasser desinfizieren, bevor Sie diese zum ersten Mal verwenden und außerdem nach jedem Menstruationszyklus.

Legen Sie die **Me Luna®** zur Desinfektion für 3 Minuten in einen Behälter mit kochendem Wasser (100 °C) oder nutzen Sie alternativ den Sterilisationsbecher.



Während der Menstruation genügt es, Ihre **Me Luna®** mit Wasser zu reinigen. Waschen Sie einfach den Menstruationsbecher für ca. 1 Minute gründlich aus.

Wir vertreiben die **Me Luna®** Menstruationstassen, weil wir davon überzeugt sind, dass nachhaltige Produkte heute mehr denn je entwickelt und gefördert werden müssen und viele Frauen heute auf der Suche nach einer umweltfreundlichen und praktischen Monatshygiene sind.



Wir denken, dass die Menstruationstasse eine perfekte Lösung für diese Frauen darstellt.

Zukunftsorientiertes Denken und Handeln, Schutz unserer Umwelt und natürlich die Bedürfnisse der Frauen stehen bei der Arbeit von **Me Luna®** im Vordergrund.

Bestellung

In Ihrer Apotheke - in 4 Größen und zwei Weichheitsgraden erhältlich

MeLuna „Classic“ Größe S PZN 12420658
Ø 38 mm, 23 ml

MeLuna „Classic“ Größe M PZN 12420664
Ø 41 mm, 28 ml

MeLuna „Classic“ Größe L PZN 12420670
Ø 44 mm, 34 ml

MeLuna „Classic“ Größe XL PZN 12420687
Ø 47 mm, 42 ml

MeLuna „Sport“ Größe S PZN 14353759
Ø 38 mm, 23 ml

MeLuna „Sport“ Größe M PZN 14353771
Ø 41 mm, 28 ml

MeLuna „Sport“ Größe L PZN 14353788
Ø 44 mm, 34 ml

MeLuna „Sport“ Größe XL PZN 14353794
Ø 47 mm, 42 ml

Sterilisationsbecher PZN 13929163

Made in Germany

Apothekenvertrieb über:



Büttner-Frank GmbH
Am Wolfsmantel 9-11
91058 Erlangen
- Germany -

Me + Luna



Einfach

in jeder **Apotheke** erhältlich

Nachhaltig

Die kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Tampons und Binden.

Menstruationstasse

Für einfach entspanntere Tage

08/2018

Produktauskunft und Info: www.me-luna.eu



Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner



Vorteile

- Umweltschutz: Vermeidung von unnötigem Müll
- größeres Fassungsvermögen als herkömmliche Monatshygiene
- unsichtbarer Monatsschutz, keine Einschränkung im Alltag
- ab der ersten Menstruation geeignet
- Preisgünstige Monatshygiene, weil wiederverwendbar
- sicherer Schutz am Tag und auch in der Nacht
- hergestellt aus hochwertigem, antiallergenem, medizinisch zugelassenem TPE.

Weichheitsgrad

Classic oder Sport?

Eine Menstruationstasse muss sich gut einführen lassen und sich dann im Inneren der Vagina vollständig entfalten. Nur dadurch kann sie perfekt funktionieren und richtig abdichten. Der Druck der umliegenden Muskulatur darf die Menstruationstasse nicht am Entfalten hindern. Dafür muss eine Menstruationstasse genügend Spannkraft bieten.

Sie sollen den Cup selbstverständlich nicht unangenehm hart spüren. Eine Menstruationstasse soll keinerlei Druckgefühl verursachen. Im eingeführten Zustand, wenn Ihr Cup passt und an der richtigen Stelle sitzt, werden Sie nichts spüren. Ein Druckgefühl haben Sie nur, wenn der Cup nicht richtig sitzt und zu groß für Sie ist. In diesem Fall ist also nicht der Weichheitsgrad schuld, sondern die Abmessungen der Menstruationstasse.

Der Weichheitsgrad Classic ist mittelweich und eignet sich für die meisten Frauen gut. **Me Luna® Classic** ist noch angenehm weich und gleichzeitig fest genug, so dass Ihre Menstruationstasse sich nach dem Einführen entfalten kann.

Me Luna® Classic wird von 97% unserer Kundinnen als angenehm und nicht zu hart empfunden. Das Entfalten des Cups kann bei gut trainierter

Beckenbodenmuskulatur ein wenig mühsam sein und etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Der Weichheitsgrad **Me Luna® Sport** ist etwas härter als bei der **Me Luna® Classic** und hat daher ein höheres Maß an Spannkraft. Die hohe Spannkraft sorgt dafür, dass sie sich auch gegen den Druck der umliegenden Muskulatur perfekt entfalten kann und so auch bei sportlicher Beanspruchung dicht hält. Sehr viele Kundinnen kommen mit dem härteren Material sehr gut zurecht, da der Cup sich optimal entfaltet und meist kein Nachpositionieren nötig ist.

Wir empfehlen **Me Luna® Sport** für Frauen:

- die überdurchschnittlich sportlich sind, oder deren Beckenbodenmuskulatur gut trainiert ist. Einige Sportarten und Übungen haben eine starke Wirkung auf die Beckenbodenmuskulatur.
- die schlank, körperlich normal fit, unter 25 Jahre alt sind und keine Geburten hatten. Sie können davon ausgehen, dass Ihre Muskulatur im Bereich des Beckenbodens meistens noch topfit ist!
- bzw. für jede Frau mit normaler Muskulatur, die mit der Anwendung vertraut ist und das schnelle Entfalten bei einer Menstruationstasse schätzt.

Classic



Einfache Anwendung

- Hände waschen
- gesäuberte **Me Luna®** falten
- gefaltet einführen
- nach ca. 8 Stunden herausnehmen, ausspülen und wieder einsetzen

Sport



Sicher

ohne schädliche Weichmacher und frei von Bleichmitteln, absorbierenden Gelen, Latex, Proteinen und Alkyphenolen.

Praktisch

durch einfache und schnell zu erlernende Anwendung.



Büttner-Frank – immer ein verlässlicher Partner