

## INFO KOMPAKT

### FRANK Würfel-Pessar

#### Indikation:

Verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmutter-senkung, Beckenbodenschwäche, Harninkontinenz, Deszensus des Blasenhal-ses. Auch bei geringer Stabilität des Beckenbo-dens einsetzbar.



Das FRANK Würfel-Pessar ist aus implanta-tionsgetestetem Silikon, physiologisch un-bedenklich und cadmiumfrei eingefärbt. Das FRANK Würfel-Pessar aus Silikon entspricht den Richtlinien des MPDG (Medizinprodukte-recht-Durchführungsgesetz).

### FRANK Würfel-Pessar Siebform (gelocht)

| Art.-Nr. | PZN       |       |         |
|----------|-----------|-------|---------|
| 106 820  | 04925 605 | 25 mm | Größe 0 |
| 106 821  | 04925 611 | 29 mm | Größe 1 |
| 106 822  | 04925 628 | 32 mm | Größe 2 |
| 106 823  | 04925 634 | 37 mm | Größe 3 |
| 106 824  | 04925 640 | 41 mm | Größe 4 |
| 106 825  | 04925 657 | 45 mm | Größe 5 |
| 106 826  | 06869 733 | 55 mm | Größe 6 |
| 106 827  | 06869 756 | 65 mm | Größe 7 |
| 106 828  | 06869 762 | 70 mm | Größe 8 |
| 106 829  | 06869 779 | 75 mm | Größe 9 |

Alle Größen auch in ungelochter Form erhältlich.

Hilfsmittel-Nr. 15.25.21.0037



### Auskunft und Info:




**Büttner-Frank GmbH**  
Am Wolfsmantel 9-11  
91058 Erlangen  
- Germany -



V 10/2021  
BNR 820007



**Büttner-Frank GmbH**

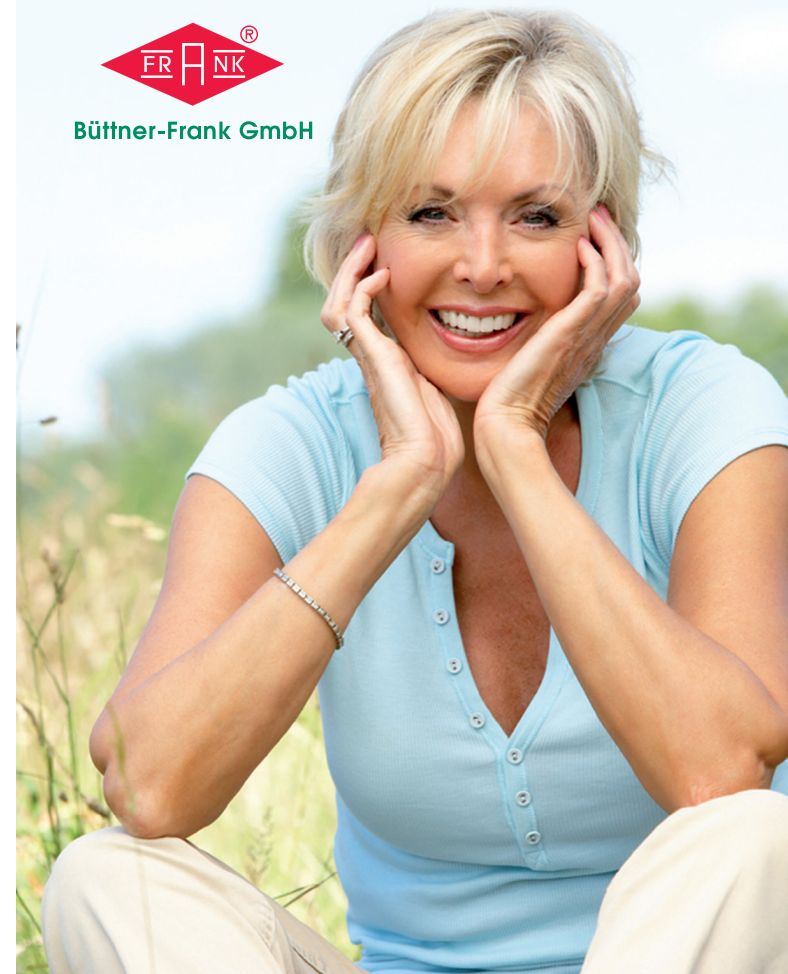

## FRANK Würfel-Pessar aus Silikon

Die Kontrolle behalten in jeder Lebenslage

### PRODUKTINFORMATION



**Büttner-Frank –  
immer ein verlässlicher Partner**

Tel. 09131 / 79 05-0 • Fax. 09131 / 60 27 69  
E-mail: kundenservice@buettner-frank.de • www.buettner-frank.de

Liebe Patientinnen,

neuere Statistiken belegen, dass jede zweite Frau ein Problem mit Blasenschwäche hat. Oft ist eine Gebärmutter-Scheidensenkung schuld an diesem unangenehmen Leiden. Durch das operative Liften des Bindegewebes, Einlegen eines Bandes oder Netzes, kann dieses Problem für einige Jahre gestoppt werden.


Doch nicht alle Frauen können oder wollen operiert werden! Für diese Patientinnen bietet das FRANK Würfel-Pessar eine wirkungsvolle Hilfe.

Durch die besondere Form lässt sich das FRANK Würfel-Pessar gut in die Scheide einlegen (ähnlich wie ein Tampon) und hält Gebärmutter und Scheide im Becken fest. Gleichzeitig wird eine Lageverbesserung von Blase und Mastdarm erreicht und beim Gehen und Bewegen der Beckenboden trainiert.


Das FRANK Würfel-Pessar beweist seine ausgezeichnete Funktion auch bei schwersten Senkungsfällen, sowie bei Stressinkontinenz.

Die Anpassung und Verordnung wird von Ihrem Facharzt (Gynäkologen oder Urologen) vorgenommen, der auch über Zusatztherapien berät und das FRANK Würfel-Pessar als Hilfsmittel auf Rezept verschreibt.

ohne FRANK Würfel-Pessar

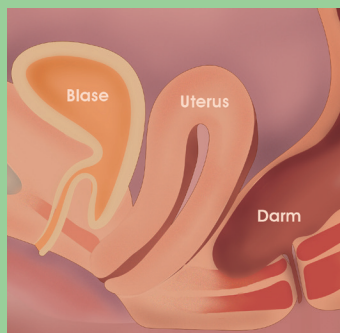

mit FRANK Würfel-Pessar

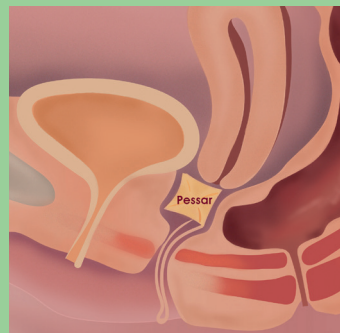

### Anwendung:

Das FRANK Würfel-Pessar kann durch die Anwenderin selbst eingesetzt werden. Der hygienische Rückholfaden erleichtert die Herausnahme und ermöglicht dadurch die tägliche Reinigung.

Wir empfehlen bei Bedarf das FRANK Würfel-Pessar morgens wie einen Tampon einzusetzen und am Abend wieder herauszunehmen.

Zur Entlastung und Stabilisierung des Beckenbodens kann das FRANK Würfel-Pessar auch nur während der sportlichen Aktivität getragen werden.

### Kontraindikationen:

Silikonunverträglichkeit, Schwangerschaft, Urge-Inkontinenz, Blasenentzündung, Harnwegsentzündung, Scheidenentzündung.

### Vorteile des FRANK Würfel-Pessars:

- einmalige Anpassung durch den Facharzt
- leichtes eigenständiges Einsetzen und Entfernen durch die Trägerin selbst
- das FRANK Würfel-Pessar besteht aus reinem Silikon und ist einfach zu reinigen
- Pessare sind Hilfsmittel, verordnungsfähig und werden von der Krankenkasse erstattet



### Unser Tipp

Die Siebform erleichtert das Entfernen!



Pessare sind Hilfsmittel und somit verordnungsfähig!