

INFO KOMPAKT

FRANK Würfel-Pessar

Indikation:

Verschiedene Grade der Scheiden- und Gebärmutterensenkung, Beckenbodenschwäche, Harninkontinenz, Deszensus des Blasenhalsses. Auch bei geringer Stabilität des Beckenbodens einsetzbar.



Das FRANK Würfel-Pessar ist aus implantationsgetestetem Silikon, physiologisch unbedenklich und cadmiumfrei eingefärbt. Das FRANK Würfel-Pessar aus Silikon entspricht den Richtlinien des MPDG (Medizinprodukte-recht-Durchführungsgesetz).

FRANK Würfel-Pessar Siebform (gelocht)

Art.-Nr.	PZN		
106 820	04925 605	25 mm	Größe 0
106 821	04925 611	29 mm	Größe 1
106 822	04925 628	32 mm	Größe 2
106 823	04925 634	37 mm	Größe 3
106 824	04925 640	41 mm	Größe 4
106 825	04925 657	45 mm	Größe 5
106 826	06869 733	55 mm	Größe 6
106 827	06869 756	65 mm	Größe 7
106 828	06869 762	70 mm	Größe 8
106 829	06869 779	75 mm	Größe 9

Alle Größen auch in ungelochter Form erhältlich.

Hilfsmittel-Nr. 15.25.21.0037



Büttner-Frank GmbH

Auskunft und Info:



Büttner-Frank GmbH
Am Wolfsmantel 9-11
91058 Erlangen
- Germany -



V 10/2021
BNR 820004



Büttner-Frank GmbH



FRANK Würfel-Pessar aus Silikon

Unkomplizierte Stärkung
für einen beanspruchten Beckenboden

PRODUKTINFORMATION



**Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner**

Tel. 09131 / 79 05-0 • Fax. 09131 / 60 27 69
E-mail: kundenservice@buettner-frank.de • www.buettner-frank.de

Liebe Patientinnen,

jede Schwangerschaft und jede vaginale Geburt belastet den Beckenboden, sowie die anderen Muskeln und Bänder im Mutterleib.


Während der Schwangerschaft ist der Beckenboden dafür verantwortlich, die immer schwerer und größer werdende Gebärmutter in Position zu halten. Durch die „gewichtige“ Aufgabe wird der Beckenboden geschwächt. Zusätzlich leidet der Beckenboden durch eine vaginale Geburt und gegebenenfalls durch einen Dammschnitt oder -riss. Seine Funktion als tragende, stützende und reflektorisch abfedernde Muskelschicht kann ein geschwächter Beckenboden nicht mehr wirkungsvoll erfüllen.

Daher ist es wichtig beim Aufbautraining nach der Geburt den Beckenboden aktiv einzubeziehen, zu kräftigen und gegebenenfalls zu stützen. Gerade nach einer Geburt ist das Gewebe sehr weich und instabil. Durch die Therapie mit einem FRANK Würfel-Pessar kann der Beckenboden auch bei sportlicher Betätigung entlastet werden.


Es gibt verschiedene Größen von FRANK Würfel-Pessaren, welche durch den Arzt angepasst werden.

Durch diszipliniertes Tragen des FRANK Würfel-Pessars ist es durchaus möglich, dass nach ca. 3-6 Monaten auf ein kleineres FRANK Würfel-Pessar umgestellt werden kann.

ohne FRANK Würfel-Pessar

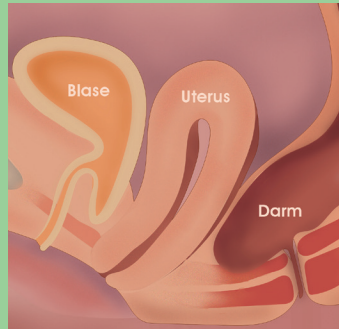

mit FRANK Würfel-Pessar

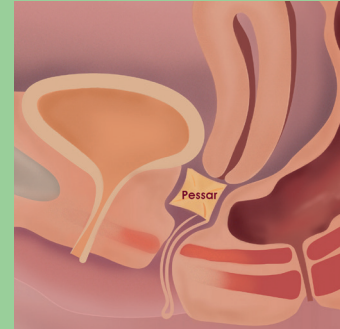

Anwendung:

Das FRANK Würfel-Pessar kann durch die Anwenderin selbst eingesetzt werden. Der hygienische Rückholfaden erleichtert die Herausnahme und dadurch die tägliche Reinigung.

Wir empfehlen bei Bedarf das FRANK Würfel-Pessar morgens wie einen Tampon einzusetzen und am Abend wieder herauszunehmen.

Zur Entlastung und Stabilisierung des Beckenbodens kann das FRANK Würfel-Pessar auch nur während der sportlichen Aktivität getragen werden.

Kontraindikationen:

Silikonunverträglichkeit, Schwangerschaft, Urge-Inkontinenz, Blasenentzündung, Harnwegsentzündung, Scheidenentzündung.

Vorteile des FRANK Würfel-Pessars:

- einmalige Anpassung durch den Facharzt
- leichtes eigenständiges Einsetzen und Entfernen durch die Trägerin selbst
- das FRANK Würfel-Pessar besteht aus reinem Silikon und ist einfach zu reinigen
- FRANK Würfel-Pessare sind Hilfsmittel, verordnungsfähig und werden von der Krankenkasse erstattet



Unser Tipp

Die Siebform erleichtert das Entfernen!