

UNSERE TIPPS:

Die Siebform erleichtert das Entfernen, da sich diese nicht so stark an die Scheidenwand fest-saugt.

Je nach Art und Stärke der Beschwerden kann die Pessartherapie in Kombination mit Beckenbodentraining zu einem größeren Erfolg führen. Hierbei wird der Beckenboden durch physiotherapeutisches Training gestärkt.

Zu Ihrer Information:

Das FRANK Würfel-Pessar gibt es in 10 Größen und wird von Ihrer Fachärztin / Ihrem Facharzt in Bezug auf die korrekte Größe ausgewählt und als Hilfsmittel verordnet.



Büttner-Frank GmbH

Auskunft und Info:




Büttner-Frank GmbH
Am Wolfsmantel 9-11
91058 Erlangen
- Germany -



V 03/2024
BNR 820007



Büttner-Frank GmbH

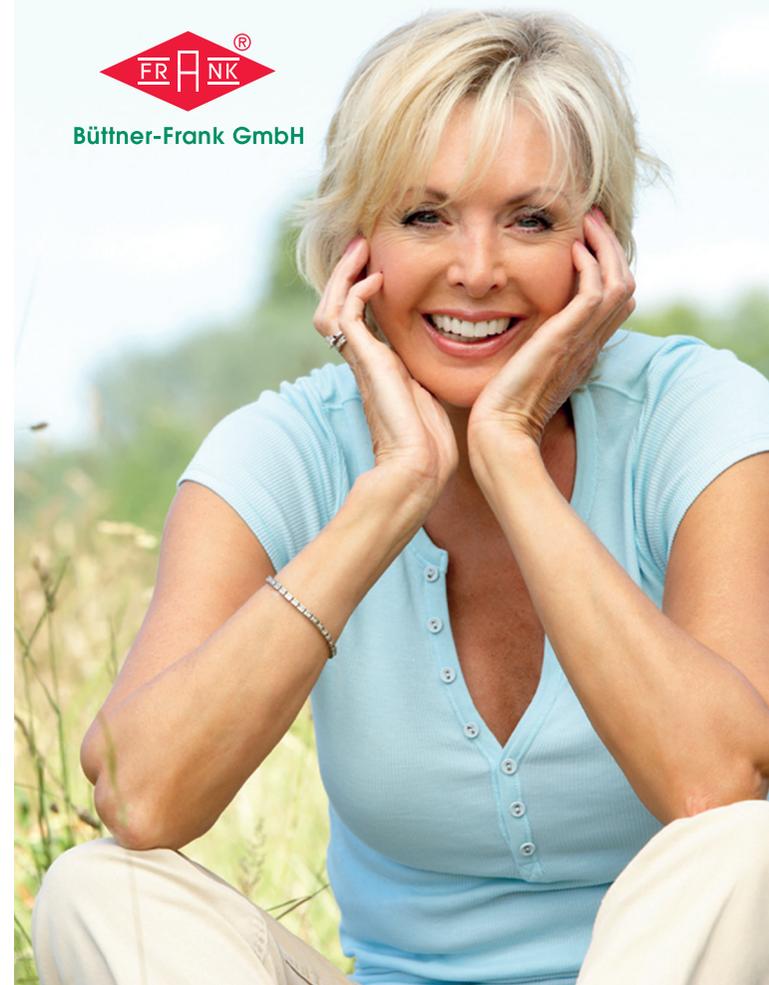

**FRANK Würfel-Pessar
aus Silikon**

Kontrolle behalten in jeder Lebenslage

PRODUKTINFORMATION

Tel. 09131 / 7905-0 • Fax. 09131 / 602769

E-mail: kundenservice@buettner-frank.de • www.buettner-frank.de



**Büttner-Frank –
immer ein verlässlicher Partner**

Liebe Patientinnen,

über Blasenschwäche oder Harninkontinenz wird nicht viel gesprochen, obwohl in Deutschland etwa jede zweite Frau ein Problem damit hat – Frauen aller Altersgruppen und aus unterschiedlichen Gründen. Harninkontinenz ist auch kein „normaler“ Bestandteil des Älterwerdens, wie viele leider immer noch meinen. Jedoch – keine Frau muss diesen Zustand akzeptieren!

Das FRANK Würfel-Pessar eignet sich besonders gut zur Behandlung von Senkungsbeschwerden der Gebärmutter, der Blase und/oder des Darms. Es haftet an der Scheidenwand und kann deshalb auch bei einem instabilen Beckenboden die Senkung der inneren Organe korrigieren. Bei jeder Bewegung wird dadurch der Muskulaturaufbau des Beckenbodens stimuliert. Deshalb kann häufig nach einigen Monaten auf eine kleinere Pessargröße gewechselt werden.

Durch die Pessartherapie erhalten betroffene Frauen ihre Lebensqualität und die Teilnahme am sozialen Leben zurück. Das FRANK Würfel-Pessar ist dank intravaginaler Anwendung unsichtbar; der ungewollte Urinverlust wird vom FRANK Würfel-Pessar aufgehalten. Selbst bei sportlichen Aktivitäten, Reisen, Wellness oder beim Baden ist die Verwendung sicher und diskret.

Das FRANK Würfel-Pessar gibt es in verschiedenen Größen und muss von Ihrer Fachärztin / Ihrem Facharzt in Bezug auf die korrekte Größe ausgewählt und als Hilfsmittel verordnet werden.

Das FRANK-Würfel-Pessar ist pflegeleicht und leicht zu handhaben. Die positive Wirkung tritt sofort ein. Ohne Schmerzen und ohne Operation. Das Einführen ist, nach ein wenig Übung, einfach und schnell – ähnlich wie bei einem Tampon. Die Patientin ist in der Lage, den Wechsel selbstständig durchzuführen. Das heißt auch, dass es auch nur zu bestimmten Aktivitäten, wie zum Beispiel zum Sport getragen und danach wieder entfernt werden kann.

Warten Sie nicht länger, werden Sie aktiv und verbessern Sie Ihre Lebensqualität!


Sprechen Sie mit
Ihrer Fachärztin / Ihrem Facharzt!

Vorteile:

- Das FRANK Würfel-Pessar ist ein zugelassenes medizinisches Hilfsmittel und wird von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen (Hilfsmittel-Nr. 15.25.21.0037).
- Das FRANK Würfel-Pessar und der Rückholfaden sind aus reinem Silikon und somit hygienisch und einfach zu reinigen.
- Das FRANK Würfel-Pessar ist leicht in der Anwendung und eigenständig durch die Patientin einzusetzen und herauszunehmen.
- Das FRANK Würfel-Pessar kann tagsüber oder bei Bedarf auch nur situationsbedingt (z.B. beim Sport oder starker Belastung des Beckenbodens) getragen werden.
- Ein gut sitzendes und korrekt angepasstes FRANK Würfel-Pessar spürt man nicht!
- Das FRANK Würfel-Pessar ist eine effektive Sofortlösung zur Symptonbehebung bei urogynäkologischen Beschwerden.

ohne FRANK Würfel-Pessar

mit FRANK Würfel-Pessar

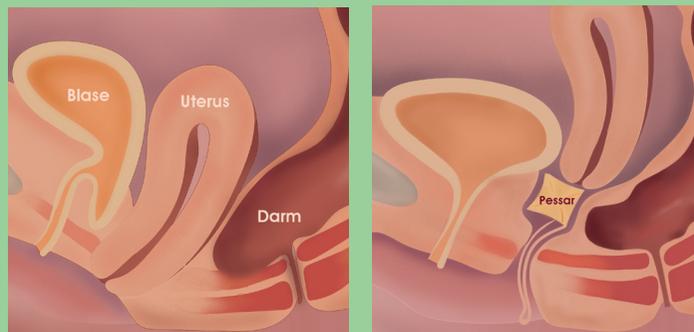

Kontraindikationen:

Silikonunverträglichkeit, Schwangerschaft, Urge-Inkontinenz, Blasenentzündung, Harnwegsentzündung, Scheidenentzündung.